

It feels  
like a  
nice  
cuddle!

 **metra**  
aide à aider

**Care'Cuddle**

Couvertures, sacs de couchage  
et coussins de cou lestés,  
avec housses correspondantes



**Care'Cuddle**

Découvrez toutes nos solutions sur [metra.be](https://www.metra.be)



Care'Cuddle est notre propre gamme de couvertures pour les genoux et les épaules, couettes, sacs de couchage et coussins de cou lestés avec housses correspondantes. Care'Cuddle aide les personnes qui présentent des troubles du traitement sensoriel grâce à une légère pression répartie sur tout le corps.

Les produits de la gamme Care'Cuddle sont utilisés pour apaiser les personnes sujettes au stress, à des sentiments ou à des troubles du sommeil liés à l'anxiété. On pourrait comparer l'effet calmant de ces dispositifs à celui d'un bon câlin. Plusieurs études ont démontré que les couvertures lestées et les dispositifs connexes réduisaient chez certains patients le besoin d'immobilisation et de médicaments. Le poids et le confort procuré par la douce pression donnent un sentiment de sécurité et favorisent la détente. Ils stimulent également la production de sérotonine, qui améliore l'humeur, et de mélatonine, qui encourage le corps à se reposer et à se relaxer. Ces dispositifs sont donc des solutions idéales pour quiconque souhaite une thérapie non médicamenteuse, à la fois sûre et efficace.



## Care'Cuddle, les avantages des micro-perles de verre

Les couvertures, coussins et sacs de couchage Care'Cuddle sont remplis de micro-perles de verre. Ces ressemblent à du sable blanc ou à des cristaux de sel. Elles sont parfaitement lisses, une excellente option pour les per-

sonnes sensibles à la texture des granulés en plastique.

Les micro-perles de verre sont une alternative écologique aux granulés en plastique et sont en outre hypoallergéniques.

- + La couverture reste douce et confortable
- + Ne font pas de bruit
- + Densité élevée
- + Ne collent pas les unes aux autres au contact de l'humidité
- + Épousent parfaitement les contours du corps
- + Peu de volume nécessaire pour exercer une pression suffisante
- + Facilité d'entretien, lavage en machine et résistance au sèche-linge

## Care'Cuddle, un concept astucieux pour un maximum de confort et d'apaisement



Toutes les couvertures Care'Cuddle sont composées d'une multitude de petits compartiments qui assurent une parfaite répartition du poids. Le rembourrage avec micro-perles de verre permet à la couverture de s'adapter parfaitement aux contours du corps. Cet enveloppement crée un sentiment de confort et de sécurité supplémentaire. Les

perles de verre ont également l'avantage de ne pas nécessiter un volume de remplissage important pour exercer une pression suffisante. La couverture elle-même n'a pas besoin d'être épaisse. Elle est dès lors plus agréable dans un environnement chaud et plus facile à entretenir.

## Metra, votre partenaire et conseiller en matière de soins

Notre équipe expérimentée étudie avec vous les solutions pouvant accroître la tranquillité d'esprit de votre équipe ainsi que celle du résident ou du patient. La production de la gamme Care'Cuddle est entièrement située dans l'Union européenne et tous les matériaux utilisés dans la production sont certifiés sur le plan de la sécurité, du respect de la peau, etc.

Notre service ne s'arrête pas à la livraison, nous nous efforçons à faire en sorte que tous les prestataires de soins concernés puissent utiliser de manière optimale les outils disponibles.

Nous ne proposons donc que des solutions basées sur les **4 piliers de METRA** :

1. Des conseils judicieux et une offre claire
2. Une bonne introduction
3. Une formation approfondie
4. Un service après-vente impeccable

## Care'Cuddle offre un sentiment de confort, de sécurité et de chaleur apaisante

### Care'Cuddle Simply

#### couverture pour les genoux ou les épaules (60 x 80 cm)

Cette couverture pour les genoux et les épaules, de 60 x 80 cm, est plutôt utilisée pendant la journée et se pose sur les épaules ou les genoux. Elle apaise les personnes confuses, anxieuses, nerveuses, surexcitées ou présentant un comportement d'errance. La sensation de la couverture sur le corps rend également les gens moins enclins à se lever, ce qui réduit le comportement d'errance.

La Care'Cuddle Simply est disponible en version coton gris foncé ou polyester imperméable. Les deux versions sont remplies de 3 kg de micro-perles de verre.

La version imperméable garantit qu'en cas de boissons renversées ou de fluides corporels, ceux-ci ne pénétreront pas dans la couverture. Vous pouvez nettoyer et désinfecter la surface imperméable. La couverture est lavable à 60 °C. Vérifiez à la charge maximale autorisée du lave-linge!

N'hésitez pas à consulter notre offre de housses : la couverture est attachée aux rubans de la housse à l'aide de boucles, ce qui empêche la couverture de glisser et de s'amonceler. L'utilisation d'une housse permet en outre de ne pas laver chaque fois toute la couverture.



| référence | matériel    | couleur    |
|-----------|-------------|------------|
| WBSIMPG3  | coton       | gris foncé |
| WBSIMPG3D | imperméable | blanc      |





## Care'Cuddle Night Bedding

**couette (135 x 200 cm)**

Cette couverture est utilisée pour garantir des nuits paisibles.

En cas de troubles de sommeil - l'agitation motrice et psychique - la pression de la couverture apaise le corps et lui donne un sentiment de protection et sécurité.

Cette couverture, entièrement en coton, est remplie de 8 kg de micro-perles de verre et d'un rembourrage supplémentaire en polyester pour plus de confort. Comme pour les duvets standards des housses sont également disponibles (cf. housses).





D'une couleur écru agréable, cette couette ressemble à un édredon normal et ne provoque aucune crainte, aucune méfiance ni stimulation supplémentaire chez l'utilisateur.

La Care'Cuddle Night Bedding est lavable à 60 °C, il faut simplement faire attention à la charge maximale autorisée du lave-linge.

La Care'Cuddle High Temperature est aussi fabriquée entièrement en coton et remplie de 8 kg de micro-perles de verre. Son atout supplémentaire est qu'elle peut être lavée à 95 °C.

Consultez aussi notre offre de housses : la couverture est attachée aux rubans de la housse à l'aide de boucles, ce qui empêche la couverture de glisser et de s'amonceler. L'utilisation d'une housse évite de laver à chaque fois toute la couverture.



|   | référence                     | matériel                         | couleur |
|---|-------------------------------|----------------------------------|---------|
|   | WBCLASG8 (Night Bedding)      | coton avec remplissage polyester | écru    |
|   | WBSIMPG8HT (High Temperature) | coton                            | blanc   |





## Care'Cuddle Sleepingbag

**sac de couchage (100 x 200 cm)**

Ce sac de couchage est composé de deux parties, la couverture lestée (partie supérieure) remplie de 6 kg de micro-perles de verre est attachée à la partie inférieure super confortable au moyen d'une fermeture à glissière.

Le Care'Cuddle Sleepingbag donne à l'utilisateur le sentiment de se trouver dans un cocon. Les deux parties étant attachées ensemble par une tirette, le Care'Cuddle ne peut pas glisser du corps pendant le sommeil. Et vu qu'elles peuvent être dézippées, on peut les utiliser et les laver séparément.

La partie inférieure couvre l'ensemble du matelas et est rendue encore plus confortable grâce à un rembourrage supplémentaire en polyester. La partie supérieure est lestée avec des micro-perles de verre.

Deux rubans situés au niveau des pieds empêchent l'utilisateur de sortir du lit avec le sac de couchage. Le Care'Cuddle Sleepingbag est proposé avec un oreiller et une taie aux couleurs assorties. L'oreiller est placé sur le dessus de la partie inférieure.

Le sac de couchage est entièrement en coton et peut être lavé à 60 °C. Il faut simplement faire attention à la charge maximale autorisée du lave-linge.



| référence | matériel | couleur     |
|-----------|----------|-------------|
| WBSBG6    | coton    | gris(foncé) |



## Care'Cuddle Collar

**coussin de cou**

Le Care'Cuddle Collar est un coussin de cou en coton, rempli de 3 kg de micro-perles de verre. Ce coussin de cou permet de se détendre, d'adopter une meilleure posture et d'augmenter la concentration. Il est équipé d'une boucle clip qui l'empêche de glisser des épaules.

La pression profonde et centrée aide à adoucir les tensions, à atténuer les douleurs et à détendre les muscles et les articulations douloureuses du dos et de la nuque. On pourrait comparer cette sensation à deux mains reposant fermement sur vos épaules.

Ce coussin de cou peut également soulager l'utilisateur des douleurs causées par le travail sur écran au niveau de la nuque ou des épaules. Il contribue également à la détente après une journée difficile et physiquement éprouvante.

Le Care'Cuddle Collar peut être lavé à 60 °C.



| référence | matériel | couleur    |
|-----------|----------|------------|
| WBCG3     | coton    | gris foncé |



## Housse Care'Cuddle

**pour les genoux ou les épaules (60 x 80 cm)**


Les couvertures de la gamme Care'Cuddle sont toutes pourvues de boucles. Les housses correspondantes sont pourvues de rubans. Cela permet d'attacher solidement les deux ensemble et d'éviter que la couverture ne glisse dans la housse. La couverture enveloppera donc toujours bien tout le corps.

La housse Care'Cuddle peut bien sûr être lavée séparément, ce qui vous évite de devoir chaque fois mettre la couverture lestée dans la machine.

### Housse Care'Cuddle Minky

Cette housse « confortable » en laine polaire peut être lavée à 30 °C, elle est très douce et agréable au toucher, les petits points en relief de la laine polaire stimulent également le sens du toucher.

### Housse Care'Cuddle Sensory

Cette housse en coton est pourvue de deux poches dans lesquelles se trouvent deux sachets, un rempli de billes fines, l'autre de billes plus grosses. Ces sachets offrent une stimulation tactile aux personnes qui aiment avoir quelque chose en main ou qui ont besoin d'une distraction sensorielle. Ils sont en polyester imperméable. 



Cette housse peut être lavée à 60 °C.



+  
**CONSEIL**  
+

de nombreux utilisateurs font preuve de créativité et mettent par exemple des photos d'êtres chers dans les poches ou cousent des rubans fidget sur la housse pour accroître encore l'apaisement !



|   | référence | matériel  | couleur    |
|---|-----------|-----------|------------|
|  | WBCSIMPM  | polyester | gris foncé |
|  | WBCSIMPS  | coton     | gris       |



## Housse Care'Cuddle

**pour couette** (135 x 200 cm)

Cette housse est en coton et a la même couleur écrie que la Care'Cuddle Night Bedding. Elle peut également être utilisée pour la Care'Cuddle High Temperature.

Les couvertures de la gamme Care'Cuddle sont toutes pourvues de boucles. Les housses appropriées sont pourvues de rubans. Cela permet d'attacher solidement les deux ensemble et d'éviter que la couverture ne glisse dans la housse. La couverture enveloppera donc toujours bien tout le corps.

La housse Care'Cuddle peut bien sûr être lavée séparément, ce qui vous évite de devoir chaque fois mettre la couverture lestée dans la machine.




| référence | matériel | couleur |
|-----------|----------|---------|
|-----------|----------|---------|

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| WBCCLAS | coton | écrie |
|---------|-------|-------|





# Care'Cuddle it feels like a nice cuddle!

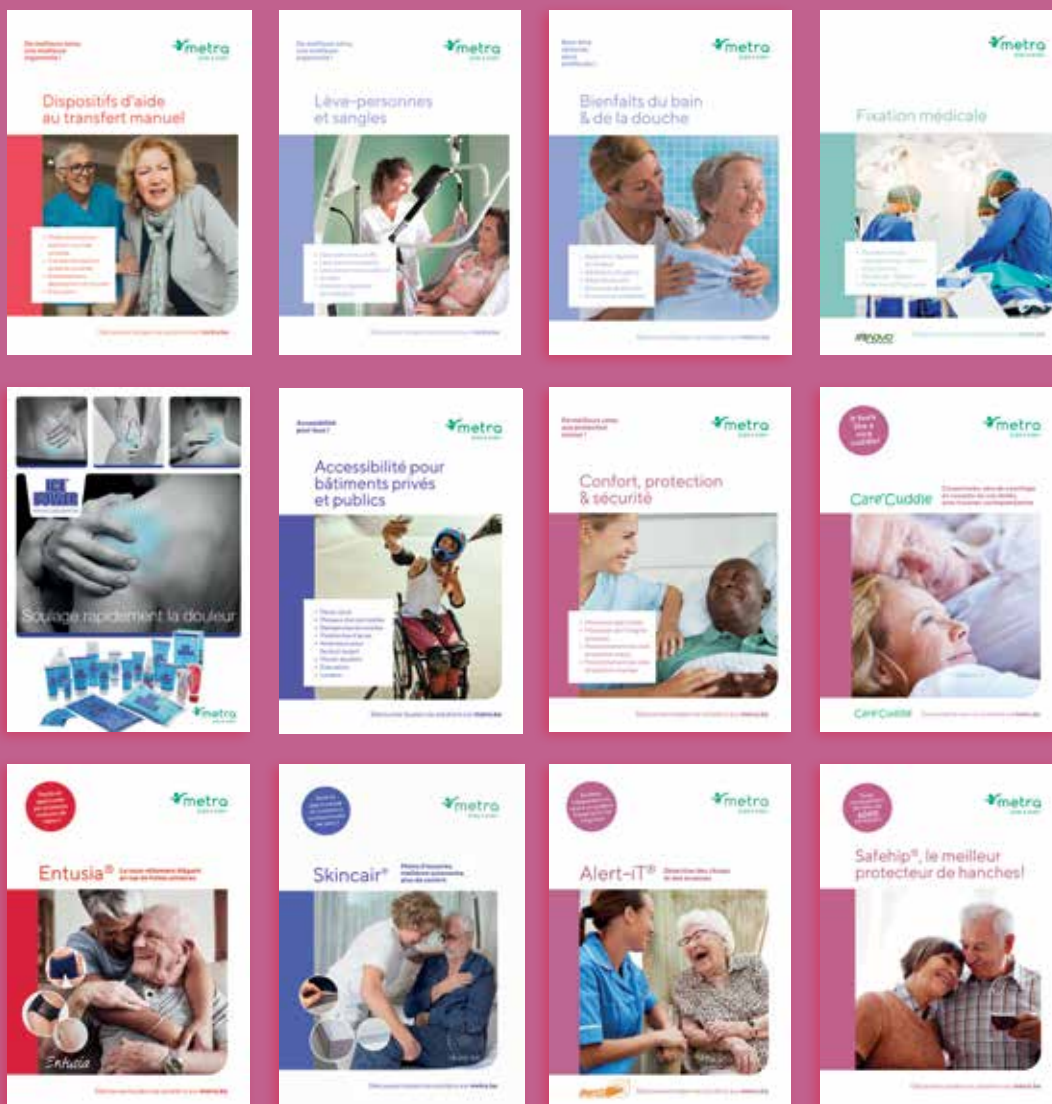

Découvrez toutes nos solutions sur [metra.be](http://metra.be)



Dispositifs d'aide au transfert manuels | Lève-personnes & sangles | Confort, protection & sécurité | Bienfaits du bain & de la douche | Fixation médicale | Ice Power | Accessibilité pour bâtiments privés et publics | ...



**METRA srl**  
Jan Samijnstraat 25  
9050 Gand | Belgique

+32 (0)9 227 71 74  
[info@metra.be](mailto:info@metra.be)  
[metra.be](http://metra.be)

TVA BE 0458.474.359  
RPM Gand | DIVISION Gand

© Metra srl - juillet 2021 - Tout droit réservé. Dans la volonté d'une amélioration constante de ses produits, Metra se réserve le droit d'adapter les spécifications de ses produits sans préavis. Sous réserve de fautes d'impression. Metra n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation de ses produits.

