

Hyperglide[®]


Ergomove[®]



Met een glijdlaken kan een patiënt in bed vergleden worden i.p.v. opgetild. Dit voor zowel hogerop brengen, in wisselhouding leggen of voor algemene positionering. Hierdoor wordt de fysieke belasting voor de hulpverlener sterk gereduceerd en wordt het comfort voor de patiënt verhoogd. De Hyperglide is gemaakt van een nieuw en uniek weefsel, speciaal voor tranfers ontworpen voor Ergomove[®]. Dit weefsel combineert uitzonderlijke stevigheid, zachtheid, soepelheid en glijdcapaciteit door zijn extreem lage wrijvingsweerstand.

<u>referentie</u>	<u>afmetingen</u>	<u>omschrijving</u>
TLEM7070	70 x 70 cm	wisselhouding/hogerop brengen (bruin etiket)
TLEM70100	70 x 100 cm	wisselhouding (rood etiket)
TLEM10070	100 x 70 cm	hogerop brengen en alg. positionering (wit etiket)
TLEM100100	100 x 100 cm	wisselhouding/hogerop brengen (roze etiket)
TLEM13070	130 x 70 cm	hogerop brengen en alg. positionering (paars etiket)

Andere maten op aanvraag

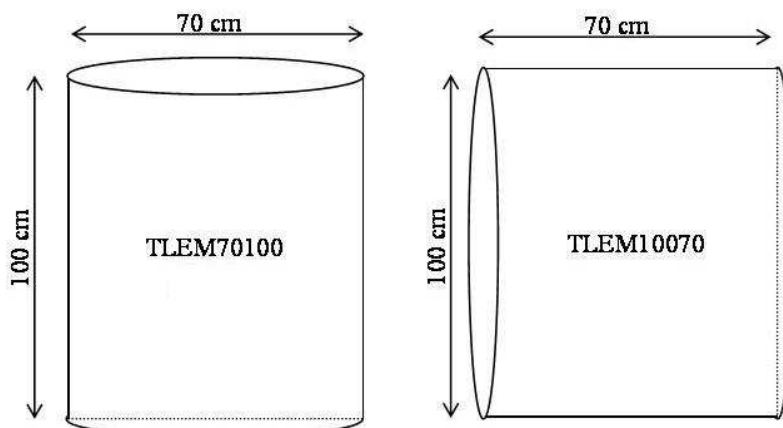

Gebruikshandleiding
(zie ook foto's op de bladzijde 3)

bladzijde 1/3

© metra - 29/4/2010 - onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen.

♦ METRA ♦ Jan Samijnstraat 25 ♦ B-9050 Gent ♦ België ♦ T +32 (0)9 227 71 74 ♦ F +32 (0)9 227 02 80 ♦
♦ e-mail: info@metra.be ♦ http://www.metra.be ♦
♦ btw BE 0458.474 359 ♦ RPR Gent ♦ KBC 446-4672911-76 ♦ BIC KREDBEBB ♦ IBAN BE91 4464 6729 1176 ♦

Gelieve deze handleiding goed te lezen vóór het gebruik van de Hyperglide om een veilig en optimaal gebruik te verzekeren.

Elke situatie, elke patiënt, elke hulpverlener is anders. Deze handleiding is dan ook niet bedoeld als handboek dat dé oplossing biedt voor elke probleemsituatie, maar eerder als middel om enkele typische handelingen die met de Hyperglide mogelijk zijn toe te lichten.

Aarzel niet om uw verdeler te contacteren met verdere vragen of suggesties over onze producten.

De Hyperglide is een glijdlaken gemaakt van een nieuw en uniek weefsel (polyethyleen), speciaal

voor transfers ontworpen voor Ergomove®. Dit weefsel combineert uitzonderlijke stevigheid, zachtheid, soepelheid en glijcapaciteit door zijn extreem lage wrijvingsweerstand.

Hierdoor kunnen patiënten comfortabel en veilig verplaatst worden in bed zonder hen te moeten optillen, zelfs al worden er anti-decubitusmaterialen zoals bijvoorbeeld visco-elastische, water- of gelmatrassen gebruikt. Studies tonen aan dat de werking van anti-decubitusmateriaal niet negatief beïnvloed wordt door het gebruik van de Hyperglide. De Hyperglide is geen tillaken !

De Hyperglide **TLEM10070** dient specifiek voor algemene positionering waarmee voornamelijk het hogerop brengen en het in en uit bed helpen van patiënten bedoeld wordt.

Hogerop brengen:

De Hyperglide wordt zoals een steeklaken onder de patiënt in de lengte van het bed geplaatst. Schouders en bekken moeten op de Hyperglide liggen. Vermits de beweging in de richting van de schouders gaat, is het aan te raden wat overschot te

hebben aan de kant van de schouders (**Fig. 1**), eerder dan aan de kant van het bekken.

Indien de patiënt dit nog kan, volstaat het dat hij de benen (of 1 been) buigt en zachtjes duwt. De patiënt glijdt vanzelf naar boven. (**Fig. 2**)

Indien de patiënt hier niet kan assisteren, wordt hem gevraagd het hoofd op te tillen (bijvoorbeeld door naar zijn buik te kijken). De arm het dichtst bij het hoofd van de patiënt wordt tegen zijn billen geplaatst, de andere hand op zijn knieën. De eerste

arm glijdt zijwaarts naar het hoofdeinde, de andere duwt de benen naar beneden (**Fig. 3**). **Let wel:** de beweging is volledig horizontaal, er wordt dus NIET getild!

Om de Hyperglide van onder de patiënt weg te halen, glijdt de hulpverlener de hand in de buisvormige Hyperglide (tussen het onderste en het bovenste deel), ter hoogte van de lenden van de patiënt, en trekt vervolgens het onderste deel binnenstebuiten onder de patiënt door (**Fig. 4**).

De Hyperglide **TLEM70100** is speciaal ontworpen voor wisselhouding, het wentelen van bedlegerige patiënten

Wisselhouding:

Bij wisselhouding blijft de Hyperglide gedurende lange tijd onder de patiënt liggen. Om een comfortabel ligoppervlak te hebben plaatst men een steeklaken boven de Hyperglide. (**Fig. 5**)

Minstens het bekken en de schouders van de patiënt moeten op de Hyperglide liggen. Eens de patiënt in bed ligt, wordt het steeklaken onder de matras vastgemaakt. Dit is om te vermijden dat de patiënt vanzelf begint te glijden.

Vóór het wentelen wordt dan eerst het steeklaken losgemaakt, en vervolgens trekt men met de handpalmen naar boven gericht aan het steeklaken ter hoogte van de schouders en van het bekken (**Fig. 6**). De patiënt glijdt mee in de richting van de trekbeweging. Op het eind van de beweging, wanneer de patiënt niet meer vergleden dient te worden, maar wel nog gedraaid, heft u uw onderarmen op terwijl uw ellebogen tegen uw romp aanleunen. Zo rolt de patiënt over op zijn zij (**Fig. 7 + 8**). Vergeet niet het steeklaken weer vast te steken onder de matras.

De Hyperglide blijft in dit geval steeds onder de patiënt liggen.

De Hyperglide **TLEM7070** wordt gebruikt zowel voor wisselhouding als voor algemene positionering, afhankelijk van hoe hij op het bed geplaatst wordt: met de openingen naar hoofd- en voeteinde is voor wisselhouding; met openingen naar de zijkanten van het bed is voor algemene positionering.

Onderhoud

Wassen op 60°C

Drogen: droogtrommel lage temperatuur

Ontsmetten: Oppervlakkig ontsmetten of door kortdurende onderdompeling. Met de meeste courante kleurloze ontsmettingsmiddelen die in ziekenhuizen gebruikelijk zijn.

Steriliseren: alleen in gas.

