

BePa-Clip® STANDARD ! l'original !

Collier de fixation mono élément pour canules trachéales

BePa-Clip® STANDARD est un collier mono élément destiné à fixer des canules trachéales approprié pour les adultes et les adolescents.
BePa-Clip® est le collier de fixation le plus confortable et de qualité la meilleure sur le marché.



BePa-Clip® STANDARD est disponible en deux tailles avec attache à crochets:

BePa-Clip® STANDARD 1 REF 200 444

BePa-Clip® STANDARD 2 REF 200 443

Il est vivement recommandé de mesurer régulièrement le diamètre du cou afin de déterminer la longueur correcte du collier de fixation.

Des confections sur mesure telles que des colliers individuels ou des tailles spéciales sont également possibles. N'hésitez pas à nous contacter.

AVANTAGES

	patient	aide-soignant	acheteur	
maniement rapide, simple et sûr	●	●	●	
doux – rembourrage particulièrement mou avec engorgage en coton	●	●		
sans latex, non adhésif – hypoallergénique, prophylaxie du décubitus	●	●	●	
bactériostatique – rembourrage légèrement absorbant et respirant	●	●		☒ = usage unique
forme stable – même après une utilisation prolongée	●	●		☒ = sans latex
utilisable sur toutes les canules externes usuelles	●	●	●	☒ = tenir à l'abri de la lumière
stérilisable, par exemple stérilisation à la vapeur à 134 °C	●	●	●	☒ = tenir à l'abri de l'humidité
économique – rapport qualité-prix optimal	●	●	●	☒ = tenir compte de mode d'emploi
Made in Germany	●	●	●	CE Made in Germany



BePa-Clip® ! l'original !

Mode d'emploi



Placez le collier de fixation dans la nuque du patient.



Passez, du premier côté, le crochet par la boucle de la plaque de la canule ou bien conduisez le Velcro® par le boucle et fixez-le.



Répétez l'opération de l'autre côté.



Réglez si nécessaire la longueur à votre convenance à l'aide des coulisseaux se trouvant sur l'élastique.



Fixation terminée.



Fixation avec attache à crochets.