

# BePa-Clip® VARIO

! l'original !

## Collier de fixation mono élément pour canules trachéales

**BePa-Clip® VARIO** est un collier mono élément destiné à fixer des canules trachéales approprié pour les adultes et les adolescents. Il s'agit du collier de fixation le plus confortable et de qualité la meilleure sur le marché.



**BePa-Clip® VARIO** est disponible en quatre tailles avec attache à crochets (H) ou à Velcro® (K):

<b>BePa-Clip® VARIO 18/H</b>	REF 200 301
<b>BePa-Clip® VARIO 25/H</b>	REF 200 501
<b>BePa-Clip® VARIO 30/H</b>	REF 200 601
<b>BePa-Clip® VARIO 36/H</b>	REF 200 701
<b>BePa-Clip® VARIO 18/K</b>	REF 200 302
<b>BePa-Clip® VARIO 25/K</b>	REF 200 502
<b>BePa-Clip® VARIO 30/K</b>	REF 200 602
<b>BePa-Clip® VARIO 36/K</b>	REF 200 702

Le chiffre de désignation du produit indique la longueur du rembourrage, par ex. VARIO 18/H = 18 cm de rembourrage. Il est vivement recommandé de mesurer régulièrement le diamètre du cou afin de déterminer la longueur correcte du collier. La réalisation de colliers individuels et de tailles spéciales est également possible.

### AVANTAGES

- maniement rapide, simple et sûr
- doux – rembourrage particulièrement mou avec engorgement en coton sans latex, non adhésif – hypoallergénique, prophylaxie du décubitus
- bactériostatique – rembourrage légèrement absorbant et respirant
- forme stable – même après une utilisation prolongée
- utilisable sur toutes les canules externes usuelles
- stérilisable, par exemple stérilisation à la vapeur à 134 °C
- économique – rapport qualité-prix optimal
- Made in Germany

	patient	aide-soignant	acheteur	
	●	●	●	
	●	●		
	●	●	●	☒ = usage unique
	●	●		☒ = sans latex
	●	●	●	☒ = tenir à l'abri de la lumière
	●	●	●	☒ = tenir à l'abri de l'humidité
	●	●	●	☒ = tenir compte de mode d'emploi
	●	●	●	CE Made in Germany

# BePa-Clip® VARIO

! l'original !

**NOVO**  
Novo Klinik-Service GmI

**metra**  
Metra aide à aider !

## Mode d'emploi



Placez le collier de fixation dans la nuque du patient.



Passez, du premier côté, le crochet par la boucle de la plaque de la canule ou bien conduisez le Velcro® par le boucle et fixez-le.



Répétez l'opération de l'autre côté.



Réglez si nécessaire la longueur à votre convenance à l'aide des coulisseaux se trouvant sur l'élastique.



Fixation terminée.



Fixation avec attache à crochets.