

BePa-KidsClip® VARIO

! l'original !



NOVO

Novo Klinik-Service Gmbh



Metra aide à aider !

Collier de fixation mono élément pour canules trachéales

BePa-KidsClip® VARIO est un collier mono élément destiné à fixer des canules trachéales approprié pour les petits prématurés, nourrissons et enfants. Il s'agit du collier de fixation le plus confortable et de qualité la meilleure sur le marché.







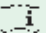

BePa-KidsClip® VARIO est disponible en trois tailles avec attache à crochets (H) ou à Velcro® (K):

BePa-KidsClip® VARIO 11/H	REF 200 201
BePa-KidsClip® VARIO 13/H	REF 200 211
BePa-KidsClip® VARIO 15/H	REF 200 221
BePa-KidsClip® VARIO 11/K	REF 200 202
BePa-KidsClip® VARIO 13/K	REF 200 212
BePa-KidsClip® VARIO 15/K	REF 200 222

Le chiffre de désignation du produit indique la longueur du rembourrage, par ex. VARIO 11/H = 11 cm de rembourrage. Il est vivement recommandé de mesurer régulièrement le diamètre du cou afin de déterminer la longueur correcte du collier.

Des confections sur mesure telles que des colliers individuels ou des tailles spéciales sont également possibles. N'hésitez pas à nous contacter.

AVANTAGES

	patient	aide-soignant	acheteur	
maniement rapide, simple et sûr	●	●	●	
doux pour la peau sensible – rembourrage avec engorgage en coton sans latex, non adhésif – hypoallergénique, prophylaxie du décubitus	●	●	●	
bactériostatique – rembourrage légèrement absorbant et respirant	●	●	●	 = usage unique
forme stable – même après une utilisation prolongée	●	●	●	 = sans latex
utilisable sur toutes les canules externes usuelles	●	●	●	 = tenir à l'abri de la lumière
stérilisable, par exemple stérilisation à la vapeur à 134 °C	●	●	●	 = tenir à l'abri de l'humidité
économique – rapport qualité-prix optimal	●	●	●	 = tenir compte de mode d'emploi
Made in Germany	●	●	●	 Made in Germany



BePa-KidsClip® VARIO

! l'original !



NOVO

Novo Klinik-Service GmI

metra

Metra aide à aider !

Mode d'emploi



Placez le collier de fixation sur la nuque du patient.



Passez, du premier côté, le crochet par la boucle de la plaque de la canule ou bien conduisez le Velcro® par le boucle et fixez-le.



Répétez l'opération de l'autre côté.



Réglez si nécessaire la longueur à votre convenance à l'aide des coulisseaux se trouvant sur l'élastique.



Fixation terminée.



Fixation avec attache à crochets.