


Trachea-Fix

Collier de fixation mono élément pour canules trachéales

Trachea-Fix est un collier mono élément destiné à fixer des canules trachéales approprié pour les adultes et les adolescents. Il est particulièrement adapté aux patients suivant une radiothérapie et aux personnes devant porter une canule à long terme, dans le cadre des soins à domicile.

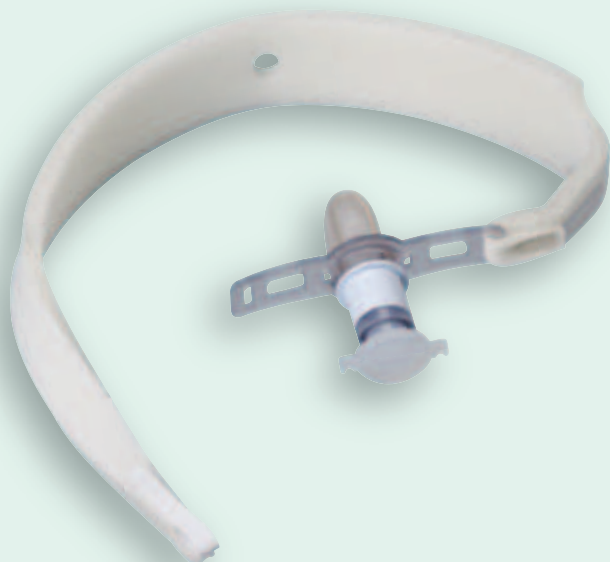

Trachea-Fix est disponible avec attache à Velcro®:

Trachea-Fix REF 200 442

La longueur minimale disponible du rembourrage est 21 cm.
La longueur maximale est 42 cm.

Par la technique du soudage ultra-sonique le collier est dépourvu de coutures. Les irritations de la peau causées par des coutures ou des parties protubérantes sont impossibles.

AVANTAGES

	patient	aide-soignant	acheteur
maniement rapide, simple et sûr	●	●	●
doux – rembourrage particulièrement mou	●	●	
sans latex, non adhésif – hypoallergénique, prophylaxie du décubitus	●	●	●
bactériostatique – rembourrage légèrement absorbant et respirant	●	●	
forme stable – même après une utilisation prolongée	●	●	
réglable en continu – fixation adaptée à tous les patients	●	●	●
discret, ne se remarque pas	●		
également adapté aux patients suivant une radiothérapie	●	●	●
utilisable sur toutes les canules trachéales usuelles	●	●	●
stérilisable	●	●	●
Made in Germany	●	●	●

Trachea-Fix

NOVO

Novo Klinik-Service GmbH

metra

Metra aide à aider !



Ouvrez le Velcro® et passez-le, du premier côté, par la boucle de la plaque de la canule.



Fixez le Velcro®.



Guidez le collier autour de la nuque.



Ouvrez le Velcro® et passez-le, de l'autre côté, par la boucle de la plaque de la canule.



Si nécessaire, réglez le côté appliqué en premier, de sorte que le rembourrage soit positionné de manière confortable au milieu de la nuque.



Fixation terminée.