

TuBo-Clip S non adhésif

Collier de fixation mono élément pour tubes endotrachéaux

TuBo-Clip S est un collier de fixation mono élément destiné à la fixation orale ou nasale de tubes endotrachéaux approprié pour les adultes et les enfants. Le Velcro® adhésif supplémentaire offre encore plus de sécurité aux patients auxquels on a administré une faible dose de sédatifs. Particulièrement adapté également en cas de problèmes cutanés ou de brûlures.



TuBo-Clip S est disponible en deux tailles:

TuBo-Clip S	normal	REF 20 - 02	longueur totale 72 cm
TuBo-Clip S	extra long	REF 20 - 06	longueur totale 85 cm

Le côté **blanc** en mousse est tourné vers le patient ou vers le tube afin de garantir l'effet agrippant spécial. Le côté **vert** adhère au Velcro®.

Novo-San lingettes imprégnées sont disponible en carton distributeur:

Novo-San	REF 20 - 80	120 lingettes par carton distributeur
-----------------	-------------	---------------------------------------

Le nettoyage aseptisé de tube avant attacher le Velcro® adhésif pour et le changement de la fixation assure une adhésivité optimale.

AVANTAGES

maniement rapide, simple et sûr	●	●	●
sûr – fixation particulièrement forte grâce à un Velcro® adhésif supplémentaire	●	●	●
non adhésif – idéal pour les barbues et les grands brûlés	●	●	●
sans latex – hypoallergénique, prophylaxie du décubitus	●	●	●
faible densité du matériau (moins de 30 % du matériau touchent la peau)	●	●	
légèrement absorbant – pas de perte de fonction, fixation toujours réglable	●	●	
longueur ajustable – fixation adaptée à tous les patients	●	●	●
utilisable également sur le combitubes et les masques laryngés		●	●
stérilisable	●	●	●
économique – rapport qualité-prix optimal	●	●	●
Made in Germany	●	●	●

	patient	aide-soignant	acheteur
--	---------	---------------	----------

●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	
●	●	
●	●	●
	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

TuBo-Clip S Utilisation en cas de tube connecté

NOVO

Novo Klinik-Service GmbH

metra

Metra aide à aider !



Fixez le Velcro® adhésif sur le tube préalablement nettoyé et séché. Pour le nettoyage aseptisé utilise par exemple **Novo-San**. Le Velcro® adhésif marque la position correcte du tube.



Placez le collier de fixation avec le côté **vert** sur le Velcro® adhésif de sorte qu'il soit partagé en deux moitiés inégales (environ 1/3, 2/3).



Croisez une fois les extrémités autour du tube pour recouvrir entièrement le Velcro® adhésif. Faites passer l'extrémité la plus longue autour de la nuque du patient, le côté blanc tourné vers le peau.



Fixez, en tirant, les extrémités avec le Velcro®. Si nécessaire, coupez au préalable la partie qui dépasse. La fixation en place.



Il est possible de fixer en même temps la canule de Guedel en enroulant simplement le collier de fixation.



Fixation terminée avec canule de Guedel