



# TuBo-Fix

NOVO

Novo Klinik-Service GmbH

metra

Metra aide à aider !



Placez le rembourrage de nuque autour de la nuque du patient, le côté en coton **blanc** tourné vers la peau. Raccourcissez le rembourrage de nuque si nécessaire.



Fixez le ruban adhésif fingerlift au milieu de la partie intermédiaire ou autour du tube préalablement nettoyé et séché. Pour le nettoyage aseptisé utilise p.ex. **Novo-San**. Retirez le film de protection.



Possibilité A.  
Croisez une fois les extrémités de la partie intermédiaire autour du tube.



Possibilité B.  
Enroulez la partie intermédiaire une fois autour du tube en tirant l'extrémité la plus longue par la fente.



À l'aide du Velcro®, fixez les extrémités de la partie intermédiaire sur le rembourrage de nuque en tirant. Un réglage de la fixation est possible à tout moment.



Fixation terminée.  
En cas de salissure, il est possible de remplacer séparément la partie intermédiaire. Le rembourrage de nuque peut rest plus longtemps sur le patient.