

# BePa-Clip® VARIO ! het origineel !

## Eendelige fixatieband voor Tracheacanules

**BePa-Clip® VARIO** dit is een tracheostomie fixatieband uit een stuk voor volwassen en jongeren. Het is de nummer één op het gebied van fixatie in de huidige markt.



**BePa-Clip® VARIO** is beschikbaar in 4 maten, met haken (H) en of klittenband (K) uitgevoerd

<b>BePa-Clip® VARIO 18/H</b>	REF 200 301
<b>BePa-Clip® VARIO 25/H</b>	REF 200 501
<b>BePa-Clip® VARIO 30/H</b>	REF 200 601
<b>BePa-Clip® VARIO 36/H</b>	REF 200 701
<b>BePa-Clip® VARIO 18/K</b>	REF 200 302
<b>BePa-Clip® VARIO 25/K</b>	REF 200 502
<b>BePa-Clip® VARIO 30/K</b>	REF 200 602
<b>BePa-Clip® VARIO 36/K</b>	REF 200 702

De maat van de fixatieband kunt u vinden op het label van de band of in de productomschrijving. vb. 18/H = lengte van 18 cm uitgevoerd met haken. Controleer de maat als de band is aangebracht of dat deze alsnog moet worden bijgesteld. Uiteraard kunnen wij op verzoek Custom-Made oplossingen bieden.

### VOORDELEN

veilig, snelle en comfortabele handeling	●	●	●
zacht-super zachte voering door een katoenen coating	●	●	
latex vrij – lijm-vrij en hypoallergeen, bescherming tegen decubitus	●	●	●
bacterieel neutraal – licht absorberend en ventilerend materiaal	●	●	
stabiel en ondersteunend – zelfs als de band langer wordt gedragen	●	●	
past op alle gangbare tracheostomie platen	●	●	●
sterilisatie is mogelijk b.v. door stoom bij 134 °C	●	●	●
economisch met een optimale prijs – en kwaliteitsratio	●	●	●
Made in Germany	●	●	●

Patiënt      Verpleging      Inkoop

= do not reuse

= latex-free

= keep away from sunlight

= keep dry

= consult instruction for use

Made in Germany



# BePa-Clip® VARIO ! het origineel !

## Gebruiksaanwijzing



Plaats de tube houder rond de nek van de patiënt.



Verbind de tube houder met haak of klittenband aan de tracheostomie plaat.



Herhaal deze procedure aan de andere zijde.



Indien nodig, pas de lengte van de fixatieband aan met behulp van de plastic verstelbare schuifklemmen.



Complete fixatie.



Bevestiging met haakjes.