

# BePa-KidsClip® VARIO

! het origineel !



NOVO

Novo Klinik-Service Gmb



Metra helpt helpen !

## Eendelige fixatieband voor Tracheacanules

**BePa-KidsClip® VARIO** is een fixatieband uit een deel voor het fixeren van tracheostomie canules voor prematuren, babies en kleine kinderen. Het is de premium fixatie methode in de markt.



**BePa-KidsClip® VARIO** is beschikbaar in 3 maten, met haken (H) en of klittenband (K) uitgevoerd

<b>BePa-KidsClip® VARIO 11/H</b>	REF 200 201
<b>BePa-KidsClip® VARIO 13/H</b>	REF 200 211
<b>BePa-KidsClip® VARIO 15/H</b>	REF 200 221
<b>BePa-KidsClip® VARIO 11/K</b>	REF 200 202
<b>BePa-KidsClip® VARIO 13/K</b>	REF 200 212
<b>BePa-KidsClip® VARIO 15/K</b>	REF 200 222

De maat van de fixatieband kunt u vinden op het label van de band of in de productomschrijving. vb. 13/H = lengte van 13 cm uitgevoerd met haken. Controleer de maat als de band is aangebracht of dat deze alsnog moet worden bijgesteld. Uiteraard kunnen wij op verzoek Custom-Made oplossingen bieden.

### VOORDELEN

	Patiënt	Verpleging	Inkoop	
veilig, snelle en comfortabele handeling	●	●	●	
zeer zacht voor de gevoelige huid – zachte voering door een katoenen coating	●	●		
latex vrij – lijm-vrij en hypoallergeen, bescherming tegen decubitus	●	●	●	☒ = do not reuse
bacterieel neutraal – licht absorberend en ventilerend materiaal	●	●		☒ = latex-free
stabiel en ondersteunend – zelfs als de band langer wordt gedragen	●	●		☀ = keep away from sunlight
past op alle gangbare tracheostomie platen	●	●	●	☂ = keep dry
sterilisatie is mogelijk b.v. door stoom bij 134 °C	●	●	●	☒ = consult instruction for use
economisch met een optimale prijs – en kwaliteitsratio	●	●	●	
Made in Germany	●	●	●	CE Made in Germany



# BePa-KidsClip® VARIO

! het origineel !



## NOVO

Novo Klinik-Service Gml

metra

Metra helpt helpen !

## Gebruiksaanwijzing



Plaats de tube houder rond de nek van de patiënt.



Verbind de fixatieband met de haak of het klittenband aan de tracheostomie plaat.



Herhaal deze procedure aan de andere zijde.



Indien nodig, pas de lengte van de fixatieband aan met behulp van de plastic verstelbare schuifklemmen.



Complete fixatie.



Bevestiging met haakjes.