

Hand-Fix

Hand en voet fixatie ineen

Hand-Fix is een zachte fixatiemethode voor handen en voeten voor patiënten van alle leeftijden.

Het wordt ingezet om de patiënten tegen zichzelf te beschermen, tegen het al dan niet bewust verwijderen van infusen of slangsystemen, drainage systemen of andere levensondersteunende apparatuur.



Hand-Fix is beschikbaar in 5 maten:

Hand-Fix 12	REF 60 - 01	3 cm breed,	12 cm lang,	150 cm band lengte
Hand-Fix 17	REF 60 - 08	4 cm breed,	17 cm lang,	150 cm band lengte
Hand-Fix Mix	REF 60 - 50	14 x Hand-Fix 12, 14 x Hand-Fix 17		
Hand-Fix 22	REF 60 - 61	7 cm breed,	22 cm lang,	150 cm band lengte
Hand-Fix 25	REF 60 - 63	7 cm breed,	25 cm lang,	150 cm band lengte
Hand-Fix 30	REF 60 - 65	7 cm breed,	30 cm lang,	150 cm band lengte

De twee maten voor kinderen zijn ook beschikbaar is een mix eenheid, genoemd **Hand-Fix Mix**.

VOORDELEN

	Patiënt	Verpleging	Inkoop	
snel, comfortabel en veilig aan te brengen	●	●	●	
huidvriendelijk – zacht zonder scherpe randen en geen extra ondersteuning nodig	●	●	●	
latex vrij - kleeft niet – hypoallergeen, bacterieel neutraal en anti decubitus	●	●	●	☒ = do not reuse
igt absorberend – geen functieverlies en ademend materiaal	●	●		☒ = latex-free
extra veilig – betrouwbare fixatie	●	●	●	☀ = keep away from sunlight
knipbaar – het manchet en of de banden zijn op maat te knippen	●	●		☂ = keep dry
gebruikersvriendelijk – ook inzetbaar als er handschoenen worden gedragen			●	☒ = consult instruction for use
sterilisatie is mogelijk b.v. door stoom bij 134 °C	●	●	●	
Made in Germany	●	●	●	CE Made in Germany

Hand-Fix

Gebruiksaanwijzing



Hand-Fix 17

Plaats het manchet met de witte zijde op de huid om de pols of de enkel. Maakt het vast met de Velcro® strip.



Bevestig de band via het veiligheidsoog om het manchet met de Velcro®.



Bevestig de banden aan het bed of anders om het been van het kind. Door het gebruik van een veiligheidsoog wordt de trekkracht geminimaliseerd.



Hand-Fix 12

De uiteinden van de band worden om de benen van de baby gebonden; draag daarna het kind indien mogelijk.



Hand-Fix 25

Het biedt de patiënt een comfortabele, huidvriendelijke bescherming vitale functies.



Hand-Fix 25

Mede door het zachte materiaal is het een betrouwbare fixatie en comfortabel en zacht voor de gevoelige huid.