


Trachea-Fix

Eendelige fixatieband voor Tracheacanules

Trachea-Fix is een fixatieband uit een deel voor het fixeren van tracheostomie canules voor volwassenen en jongeren, zeer geschikt voor patiënten welke worden bestraald of daar waar men voor een langere tijd gebruik maakt van een canule zoals in de thuiszorg.

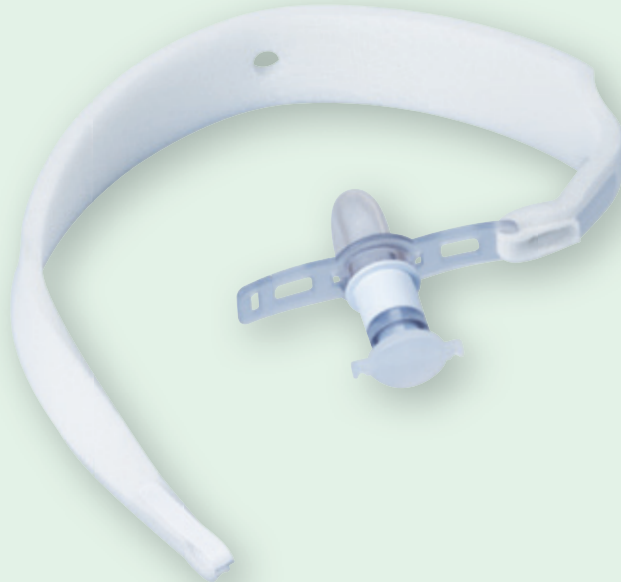

Trachea-Fix is beschikbaar met Velcro® klittenband:

Trachea-Fix REF 200 442

De minimale lengte van de band is 21 cm.
De maximale beschikbare lengte is 42 cm.

Door gebruik te maken van een ultrasone fabricage techniek is deze houder naadloos. Huidirritaties wellicht veroorzaakt door naden of losse delen zijn hierdoor onmogelijk.

VOORDELEN

	Patiënt	Verpleging	Inkoop	
veilig, snelle en comfortabele handeling	●	●	●	
zeer zacht en comfortabele voering	●	●		
latex vrij – lijmvrij en hypoallergeen, bescherming tegen decubitus	●	●	●	
bacterieel neutraal – licht absorberend en ventilerend materiaal	●	●		
stabiel en ondersteunend – zelfs als de band langer wordt gedragen	●	●		
bijstellen is geen probleem – past bij iedere patiënt	●	●	●	☒ = do not reuse
past op alle gangbare tracheostomie platen	●	●	●	☒ = latex-free
niet opvallend en discreet draagcomfort	●			☀ = keep away from sunlight
ook geschikt als de patiënt wordt bestraald	●	●	●	☂ = keep dry
sterilisatie is mogelijk b.v. door stoom bij 134 °C	●	●	●	☒ = consult instruction for use
Made in Germany	●	●	●	CE Made in Germany

Trachea-Fix

Gebruiksaanwijzing

NOVO

Novo Klinik-Service GmI



Metra helpt helpen!



Bevestig het Velcro® klitteband aan een zijde van de tracheostomie plaat.



Fixeer de Velcro® band.



Bevestig de band vervolgens om de nek van de patient.



Open vervolgens de Velcro® klitteband en bevestig deze aan de andere zijde van de tracheostomie plaat.



Indien nodig, trek het geheel wat strakker en plaats de houder in het midden van de nek. Dit met dat deel van het klitteband welke u als eerste aan de plaat heeft bevestigd.



Fixatie op de juiste plaats.