

# TuBo-Clip S kleefvrij

## Eendelige fixatieband voor Endotracheale Tubes

**TuBo-Clip S** is een fixatieband uit een stuk, voor tubes voor volwassenen, jongeren en schoolkinderen, gebruikt voor orale en nasale toepassingen. De Velcro® klittenband draagt bij tot meer zekerheid van fixatie. Ook is deze band uitermate geschikt voor patiënten met huidirritaties en brandwonden.



**TuBo-Clip S** is verkrijgbaar in twee maten:

**TuBo-Clip S** normaal REF 20 - 02 totale lengte 72 cm

**TuBo-Clip S** extra lang REF 20 - 06 totale lengte 85 cm

Zorg ervoor dat de witte kant van het fixatiemateriaal telkens in de richting van de patiënt en of de tube wordt aangebracht om zo optimaal te profiteren van het aanklevend effect van het fixatiemateriaal. Bevestig de band met de groene zijde op de Velcro®.

**Novo-San** geïmpregneerde reinigingsdoekjes in een dispenser doos:

**Novo-San** REF 20 - 80 120 doekjes per doos

Reinig de tubes voordat de plakstrip van Velcro® tape voor deze wordt vervangen. Dit zorgt voor een optimale hechting.

### VOORDELEN

|  | Patiënt | Verpleging | Inkoop |                                 |
|--|---------|------------|--------|---------------------------------|
| een snelle en eenvoudige werkwijze   | ●       | ●          | ●      |                                 |
| extra stevige fixatie door het gebruik van Velcro®                           | ●       | ●          |        |                                 |
| geen lijm – ideaal voor patiënten met baarden of snorren en of brandwonden   | ●       | ●          | ●      |                                 |
| latex vrij – hypoallergeen, bacterieel neutraal, bescherming tegen decubitus | ●       | ●          | ●      |                                 |
| geringe materiaaldichtheid, slechts 30% komt in contact met de huid          | ●       | ●          |        |                                 |
| licht absorberend – geen verlies van functionaliteit en vormgeving           | ●       | ●          |        | ☒ = do not reuse                |
| kan eenvoudig op maat worden gemaakt – past bij alle patiënten               | ●       | ●          | ●      | ☒ = latex-free                  |
| ook inzetbaar bij dubbellumen tubes en of larynxmaskers                      |         | ●          | ●      | ☀ = keep away from sunlight     |
| sterilisatie is mogelijk b.v. door stoom bij 134 °C                          | ●       | ●          | ●      | ☂ = keep dry                    |
| economisch met een optimale prijs – en kwaliteitsratio                       | ●       | ●          | ●      | 📖 = consult instruction for use |
| Made in Germany  | ●       | ●          | ●      | CE Made in Germany              |



# TuBo-Clip S

## Applicatie als de tube is aangesloten - Gebruiksaanwijzing




Bevestig de Velcro® strip op de tube. Maak de tube vooraf goed schoon en vooral vet en stofvrij. Gebruik voor het reinigen alstublieft **Novo-San**. De strip markeert de juiste positie van de tube.



Plaats de fixatieband met de groene zijde op de Velcro® zodat de strip in twee ongelijke delen wordt verdeeld. Verhouding 1/3 tot 2/3 deel. Waarbij 1/3 deel het gedeelte met de opening is.



Draai de band eenmaal om de Velcro® strip. Plaats het lange deel van de band om de nek van de patiënt, waarbij de witte zijde van de band direct op de huid dient te worden geplaatst. Maak de lus aan de bovenzijde van de tube.

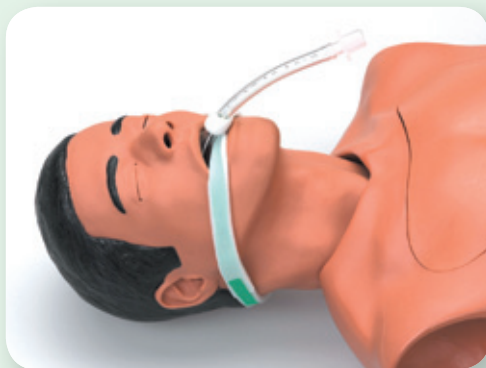

Maak de beide zijden van de fixatieband met de Velcro® aan elkaar vast. Knip de band op maat.



Een keelpijpje kan op deze manier eenvoudig worden gefixeerd. Door de fixatieband er om heen te draaien.



Volledige fixatie inclusief een keelpijpje.