MOBILEX Chaises de douche et toilettes ACCESSOIRES



Les chaises de douche et de toilettes Mobilex peuvent être équipées de plus grandes roues à l'arrière afin que l'utilisateur puisse se déplacer indépendamment. Les **roues de 24"** sont livrées complètes avec frein de stationnement, jantes adhérentes et pneus pleins fournis.

Le rebord agrippant de la jante a une forme anatomique pour une bonne prise même avec les mains mouillées. La paire de roues 24» comprend également les freins et toutes les pièces nécessaires pour le montage. Gardez à l'esprit que les roues de 24" font la largeur totale agrandit de 8 cm.

Lors de l'utilisation des roues arrière de 24" il est nécessaire d'installer un '**anti-basculement'** surtout sur un modèle inclinable. L'anti-bascule peut être monté facilement (sans outils).

Pour fournir un soutien dorsal optimal **un dossier velcro** est utilisé, pour ajuster de manière optimale au dos de l'utilisateur au moyen de 3 ceintures réglables.

La ceinture de sécurité n'a pas de pièce en métal et donc particulièrement adaptée pour une utilisation dans des environnements humides (ne peut pas rouiller).

Le siège en mousse PU souple est équipé de série d'une découpe hygiénique. Les bords des évidements sont inclinés pour que le couvercle s'y appuie fermement. Le siège est fixé avec des clips et peut être facilement fixé et enlevé sans outils. La découpe mesure 27 x 19 cm.

Un siège en PU souple doté d'une ouverture hygiènique et fermé à l'avant, est disponible en option. Le siège est fixé avec des clips et peut être facilement retiré sans outils. La découpe mesure 27 x 19 cm.

Il y a une plaque de **siège souple disponible en couvrant l'ensemble du siège** standard ou celui avec la découpe ovale. La plaque de siège à une forme telle qu'elle s'insère dans l'évidement du siège et ne peut donc pas glisser, notamment lors des mouvements.

Si le jet d'urine n'atteint pas le seau des toilettes, il peut y avoir une **protection contre les éclaboussures** à l'avant (monté sans outils). La protection sert également de canette entre les jambes. Le produit est fabriqué en polyuréthane souple et est facile à nettoyer.

Un appui-tête est disponible pour tous les sièges de douche et de toilette et peut être facilement attaché. L'appui-tête est réglable en hauteur et en profondeur. Fabriqué de mousse de polyuréthane douce et confortable, réglable pour s'adapter au mieux à l'utilisateur.

Les sièges de douche-toilette sont équipés d'un siège en mousse PU, qui offrent un bon confort et qui convient à la plupart des gens. Un coussin recouvert en 'Decutex', **une mousse extra douce** est disponible pour un meilleur soulagement de la pression. Toutes les coutures sont entièrement scellées, très facile à nettoyer et 100% étanche. Le coussin est disponible pour le siège avec/sans ouvert à l'avant.

Une barre de sécurité peut être utilisée pour fournir une sécurité supplémentaire. Les adaptateurs pour les barres de sécurité sont montés sur les accoudoirs, le support peut être facilement retiré une fois monté.

Le support pour amputé soutient le moignon de la jambe dans la bonne position et peut être monté sans l'aide d'outils à la place du repose-pied classique. Le support est équipé de 2 coques en polyuréthane et pouvant être utilisées, inclinées indépendamment pour un maintien optimal.

Les coussinets de soutien latéraux sont en polyuréthane moulé et sont montés sur le tube arrière du siège, elles sont réglables selon les besoins de l'utilisateur. Les coussinets sont disponibles en 2 tailles 10 x 14 cm ou 14 x 20 cm.

Des roues de 5" avec tube allongé sont disponibles pour les sièges de douchetoilette. Cela permet d'augmenter la hauteur en dessous l'assise de 5 cm.

Description

Référence

MDSST MDSTI

Description

Chaise de toilet- et douche standaard, non inclinable, largeur de chaise 45 cm Chaise de toilet et douche, inclinaison hydraulique, lageur de siège 45 cm







Jan Samijnstraat 25 9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

info@metra.be

www.metra.be