

Ice Power Cold/hot pack évite et réduit le gonflement en cas de blessures dans les tissus mous.

- effet analgésique
- pack de gel réutilisable qui se garde au froid dans un frigo ou un congélateur
- reste souple jusqu'à -27°C.
- s'adapte parfaitement à la forme des parties du corps pour garantir un contact maximal avec la peau.
- le contenu du Cold/Hot pack IcePower reste réparti de façon homogène, même après sa mise en place.
- pour un résultat optimal, garder la compresse froide de gel pendant 10 à 15 minutes sur la partie du corps concernée. Toujours emballer la compresse de glace dans une serviette pour éviter les engelures.
- réchauffer dans un bain d'eau chaude ou dans un four à micro-ondes pour l'utiliser comme une bouillotte.

Poursuivre le traitement avec le gel refroidissant Ice Power. Ne jamais appliquer de chaleur sur une inflammation.

Description

Référence

IPCHP

Description

Ice Power, Cold/Hot Pack 29x12 cm, boîte CNK1640-374 réutilisable

Caractéristiques

Ice Power Cold / Hot Pack

Ingredients: Aqua, Propylene Glycol, Carbomer Crosspolymer, TEA, CI Food Blue 5.

